










S-VISOR (SLP-V)

Viseira de Proteção para Rosto



Características


- 
Elevada proteção
 Design ergonómico da viseira protege o utilizador contra elementos projetados.
- 
Fácil desinfeção
 Produto facilmente desinfectável.
- 
Lente rotativa até 90°
 Suporte com vários níveis de rotação: 0° / 30° / 60° / 90°.
- 
Leve e confortável
 Viseira estável durante o uso e excelentes propriedades óticas. Ideal para um uso prolongado.
- EN Normas**
 A Viseira SLP-V foi fabricada tendo em conta as Normas Harmonizadas e Regulamentação aplicáveis, ou seja: normas EN 166 (6.1; 6.2; 6.3; 7.1.1; 7.2.4; 9 e 10) e EN 168 (12 e 18) e Regulamento (UE) 2016/425.
- 
Personalizável
 Impressão do nome do utilizador ou logótipo da empresa.
- 
Resistente
 Material da lente inquebrável e duradoura.
- 
Sustentável
 Reutilizável e amiga do ambiente.
- 
Tamanho único
 Adaptado para homem e mulher.
- 
Tira ajustável
 Material flexível, apropriado para o contacto com a pele e com vários pontos de ajuste.

Não são conhecidas contraindicações na utilização da Viseira de Proteção referência SLP-V, no entanto, materiais que podem entrar em contacto com a pele do utilizador podem causar reações alérgicas em indivíduos suscetíveis.

Armazenamento e Limpeza

Pode ser armazenado e transportado nas suas embalagens originais à temperatura ambiente (0°C a 30°C). Pode ser armazenado em ambientes escuros até 3 anos. **Não armazenar em locais de exposição direta de luz e calor.** Limpar com água morna, sabão e um pano macio ou com solução desinfectante não abrasiva. **Não usar solventes ou abrasivos.**

Instruções de Montagem

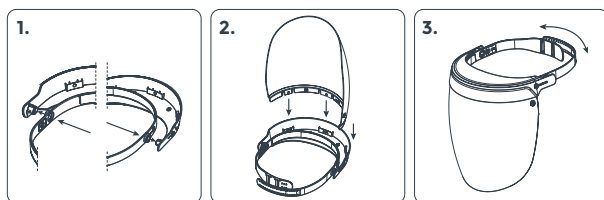

1. Encaixar tira ajustável ao suporte da viseira através dos cliques.

2. Encaixar a lente no suporte (3 cliques) – até ouvir o som de "clique".

3. Ajustar à cabeça.

Marcação

A Viseira referência SLP-V possui uma marcação, com o seguinte significado:

Marcação na ocular: **3 SOCEM** significando que se trata de uma Viseira de Proteção com bom reconhecimento de cores, fabricada por SOCEM ED, S.A.

Marcação na estrutura de suporte: **SOCEM EN166 3** significando que se trata de uma Viseira de Proteção com proteção contra salpicos de líquidos, fabricada por SOCEM ED, S.A.

Validade

Caso a Viseira se apresente com picadas, riscada ou danificada deve ser substituída por outra equivalentes de origem.